



Chamber Protect

Набір для очищення камер MELAG

Надійне очищення та тривалий захист, завдяки якому ваш автоклав сяє: новий набір для очищення камер MELAG видаляє навіть невидимі для ока забруднення і, таким чином, зберігає камеру від знебарвлення та відкладень. Користуйтеся перевагами набору Chamber Protect під час очищення камери та лотків раз на тиждень:

- ✓ Потужний засіб для чищення з 50 тканинами без ворсу та 1 тканиною з мікрофібри
- ✓ Особливо дбайливий до матеріалу камери та ущільнювача дверцят
- ✓ Схвалено в результаті обширних випробувань на сумісність матеріалів
- ✓ Ідеально підходить до всіх парових стерилізаторів MELAG



У вас є вибір:



При регулярному використанні
Chamber Protect



Без регулярного
очищення камери

Крок за кроком до ідеального результату:

Для довготривалого захисту та тривалого блиску використовуйте набір для очищення камер один раз на тиждень, як описано нижче:




1. Застосувати Chamber Protect

Відкрийте дверцята автоклава, вимкніть пристрій і дайте йому охолонути. Далі зробіть приблизно 2 розпилення Chamber Protect на внутрішню частину дверцят і приблизно 15 розпилювань у камеру.



2. Нанесіть Chamber Protect

Нанесіть чистячий спрей на всю поверхню з нержавіючої сталі за допомогою однієї з тканин без ворсу. Дайте спрею Chamber Protect всмоктуватися приблизно 3 хвилини.

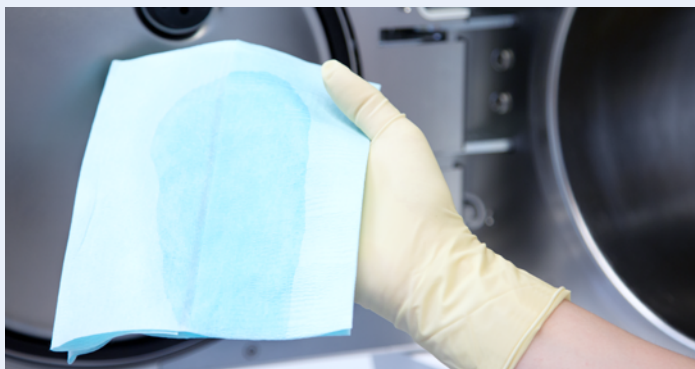

3. Очистіть поверхні з нержавіючої сталі

Візьміть іншу тканину без ворсу і змочіть цю тканину, а також камеру достатньою кількістю демінералізованої води (приблизно по 50 мл). Протріть тканиною поверхні, на яких нанесений Chamber Protect, і дайте воді всмоктуватися приблизно 5 хвилин.



4. Висушіть поверхні з нержавіючої сталі

Наприкінці, ретельно витріть внутрішню частину дверцят і всю камеру синьою тканиною з мікрофібри. Тепер автоклав знову доступний для стерилізації інструментів.

ПП «Галіт»

вул. 15 Квітня, 6Є, м. Тернопіль,
47711, Україна

0 800 502 998
office@galit.te.ua
service@galit.te.ua

GALIT

Стоматологічне обладнання

For further information:
www.melag.com

MELAG
competence in hygiene