


Гідроблок стаціонарний

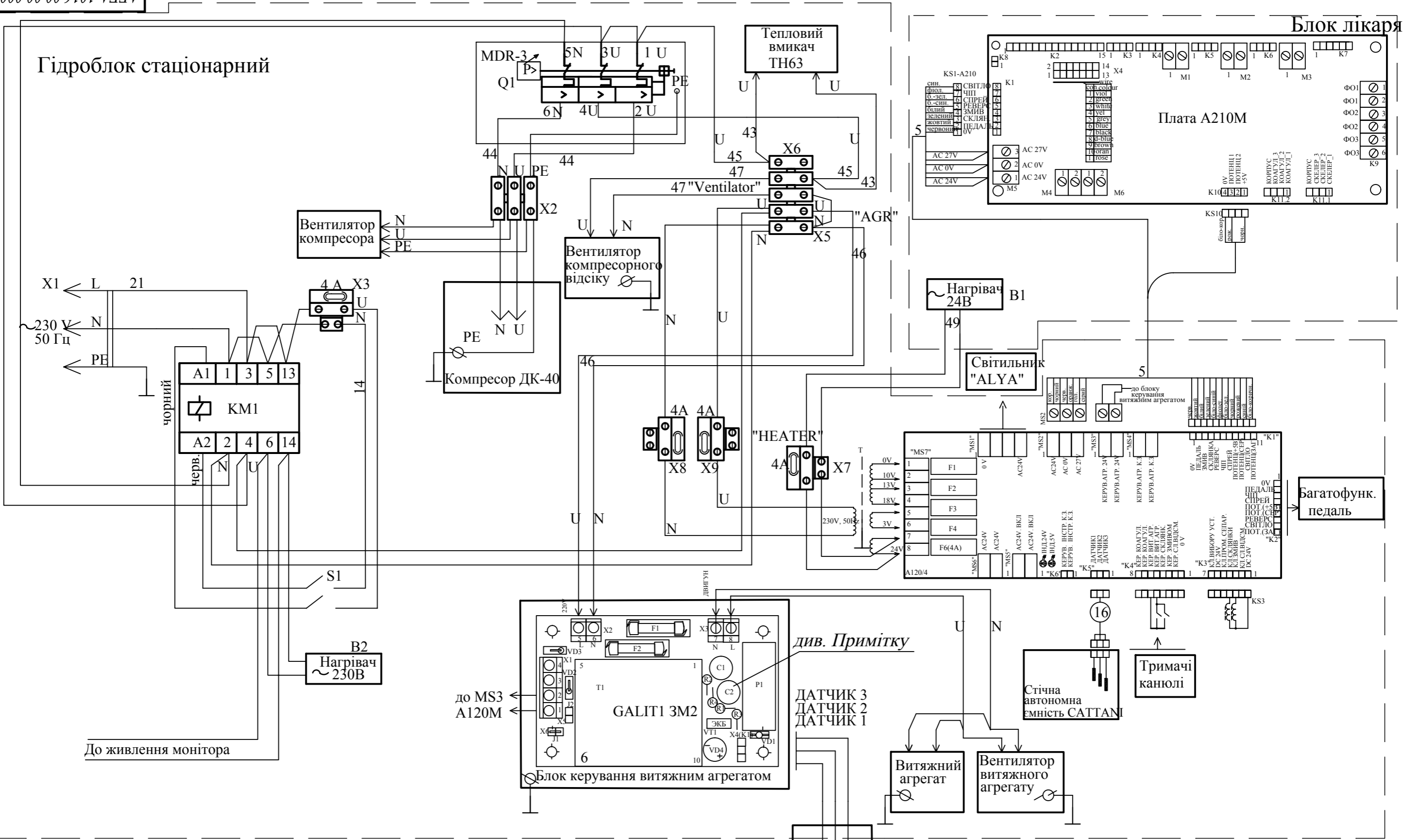


Блок лікаря

Плата А210М

Багатофунк. педаль

Примітка! C2-470мF.

- B1 -Нагрівач 24VAC 60W "DTS-DESIGN"
- B2 -Нагрівач 230VAC 60W "U.S. Medlink"
- KM1- Електромагнітний пускач ПМ-S-25 "АСКО"
- Q1-Реле тиску MDR-3 "Condor"
- T-Трансформатор ТРЖ-47В
- S1-Перемикач SWR 44 "Парис"
- X1-Шнур мережний ПВС 3x1.5мм з трьохполюсною вилкою
- X2,X4...X6 -Клемна колодка Н-4ММ2 РР "Kanlux"
- X3,X7...X9 -Клемна колодка TLF-100-2P "ТЕМ"

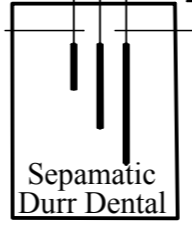

N-голубий
U-коричневий

AEГА 1016.00.00.000-05 Е4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Омельчук		
Пров.	Калина		
Т.контр.			
И.контр.	Блінова		
Утв.	Темченко		
ГАЛЛАНТ автономний			Лит.
Схема зєднань			Масса
Замовлення #240-12			Масштаб
			1:1
		Лист	Листов
			1

Ив. № лист. Подп. и дата. Ив. № дубл. Подп. и дата. Ив. № лист. Подп. и дата. Ив. № дубл. Подп. и дата. Ив. № лист. Подп. и дата. Ив. № дубл. Подп. и дата.